

LE MAG DE LA VISION

By Light Optical

MAUBOUSSIN

Artiste Joaillier



Florent MAUBOUSSIN

Pure Titanium, l'ultime confort high-tech

Lunettes Mauboussin MTi 1904, Pure Titanium
48% plus léger, 100% biocompatible

Conçu et distribué par ADCL Tél.: 01 41 58 18 00 . www.adcl.fr

REJOIGNEZ LA LICENCE DE MARQUE



Un accompagnement personnalisé avec des prix d'achat imbattables !

contact@totalaudition.com



EDITO

Afin d'apprécier le monde qui nous entoure, il est indispensable de prendre soin de notre vue au quotidien. Sollicitée en permanence, elle joue un rôle majeur dans notre vie et sa préservation est essentielle à notre bien-être.

En France, une personne sur deux est concernée par des troubles de la vision. Grâce aux avancées techniques, à l'arrivée de nouveaux matériaux et aux nouvelles générations de verres, il est désormais aisé de trouver l'équipement adapté aux besoins de chacun.

À la fois professionnels de la santé, conseillers, techniciens et visagistes, ces artisans au service de vos yeux vous guident et vous aident à trouver la solution, complète et personnalisée, qui vous conviendra le mieux.

Parce que vos yeux ont le droit à ce qu'il y a de meilleur, n'hésitez pas à solliciter nos opticiens partenaires pour profiter de leur expertise et de leurs précieux conseils.

À bientôt dans notre réseau,

Benjamin Zeitoun
Directeur de Publication

SOMMAIRE

Vision Enfant <i>Les enfants et le soleil</i>	6
Vision Verres <i>Verres photochromiques</i>	7
Vision Sport <i>Sport & Vision : Le duo Gagnant</i>	8-9
Vision Bien-être <i>Travail sur écran</i> <i>Gymnastique Oculaire : Prenez soin de vos yeux</i>	10-11
Vision Santé <i>La Basse vision</i> <i>Ophtalmologue : Quand doit-on consulter?</i>	12-13
Vision Shopping <i>Les nouvelles collections de l'année</i>	14-15
Vision Caritative <i>Le Benjamin Show : Association Princesse Margot</i>	16-17
Vision Culture <i>Le théâtre de Dix Heures</i> <i>Nos coups de coeur Théâtre</i>	18-19
Vision Lunettes <i>Renouvelez vos lunettes : Une démarche simplifiée</i> <i>Les verres correcteurs</i>	20-21
Vision Lentilles <i>Lentilles : Mode d'emploi</i> <i>Les lentilles et le maquillage</i>	22-23
Vision Light Optical <i>Light Optical : Histoire de la Marque</i> <i>Lunettes sans Frontière : L'Opticien Engagé!</i>	24-25
Vision Morpho <i>Des lunettes pour chaque visage</i>	26



Editeur : Light Optical
Conception et rédaction : Com'Optic
Siège Social : 53, rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
Email : communication@lightoptical.fr
Téléphone : 01 41 34 36 10
Directeur de publication : Benjamin Zeitoun
Directrice de publicité : Eva Gallois
Graphiste / Maquettiste : Margaux Hattab

POLICE



www.policelifestyle.com

LES ENFANTS ET LE SOLEIL

Un capital vue bien préservé

L'été, les rayons du soleil peuvent gravement blesser les yeux de vos enfants et entraîner, plus tard, des maladies oculaires graves.

LES YEUX SONT COMPOSÉS DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR UNE VISION NETTE

❶ **La cornée** : film transparent protégeant l'iris et la pupille, il absorbe une partie des UV.

❷ **Le cristallin** : très sensible, il est également acteur dans l'absorption des UV. Contrairement à la cornée, les cellules du cristallin ne se renouvellent pas. Il devient de plus en plus trouble au fur et à mesure de l'exposition aux rayons du soleil.

❸ **La rétine** : située sur le fond de l'oeil, elle est la plus sensible aux UV.



Chez les **enfants**, le **cristallin** est **plus clair**, il va donc être plus **perméable** aux **rayons ultra-violet**s. Ces derniers vont donc traverser le **cristallin** jusqu'à atteindre la **rétine**. Pour y remédier, choisissez pour vos enfants des **lunettes de soleil de catégorie 3-4**, elles leur offriront une **protection optimale**.



VERRES PHOTOCROMIQUES

Le confort à tout instant

Ces verres ont la particularité de s'adapter aux variations de lumière. Ils deviennent foncés en extérieur sous l'action des UV et blancs en intérieur.

Appelés aussi verres à teinte variable, les verres photochromiques ont la particularité de s'adapter aux variations de lumière. En intérieur, ces verres sont aussi clairs que des verres blancs et reprennent une teinte foncée en extérieur sous l'effet des rayons UV (même en l'absence de soleil).



DES AVANCÉES TECHNIQUES CONSIDÉRABLES

Aujourd'hui, grâce à la diversité des matières, les verres photochromiques sont plus légers, leur vitesse de réaction a considérablement augmenté, ils sont disponibles dans de nombreuses teintes et peuvent s'adapter à tous types de lunettes, de corrections et de situations.

N'hésitez pas à demander une démonstration à votre opticien.

LES AVANTAGES

- 1 Un confort de port en toute circonstance grâce à une protection permanente des yeux sensibles à la lumière extérieure.
- 2 Un filtre UV qui protège les yeux des effets néfastes des UV quelle que soit l'intensité lumineuse.



SPORT ET VISION

Le duo gagnant

Porter des lunettes en toutes circonstances peut parfois s'avérer gênant. Pourtant, il est tout aussi inconfortable de pratiquer une activité physique sans y voir clair.

À CHAQUE SPORT SON OPTIQUE, FAITES VOTRE CHOIX

Aujourd'hui, de nombreuses solutions existent pour vous équiper sans impacter vos performances.

À vélo, en roller, en course à pied...

Ce sont des **sports intenses**, notre regard est souvent dirigé vers le bas et avec l'apesanteur, **les lunettes tombent**. Optez, pour des lunettes avec une **armature solide** et **enveloppante** pour une bonne tenue tout au long de l'activité. Equipez votre monture de **verres polarisants** (diminuant les reflets dus à la réverbération) avec une **teinte claire** (jaune-vert) pour restituer au mieux les couleurs en cas de **faible luminosité** sont à privilégier.



Ski, Alpinisme, Trekking

Pratiquées parfois dans des **conditions extrêmes**, ces activités soumettent les yeux à de multiples agressions : **UV, infrarouges, réverbération, éblouissement...** Des verres de **catégorie 3** avec une **protection 100% UV** sont conseillés. Côté monture, optez pour des **formes très enveloppantes** offrant une bonne **protection latérale**. Des **verres polarisants bruns, anti-buée et anti-reflet** apportent pour ce genre de sports le **meilleur confort**.



S P E C T
E Y E W E A R

Red Bull 
S P E C T
E Y E W E A R



RUN
RIDE
JUMP!*

With the innovative **WING** DUAL TEMPLE SYSTEM
developed by SPECT Eyewear!*

* Cours, bouge, saute avec le système innovant de double branche développé par SPECT Eyewear!

T RAVAIL SUR ÉCRAN

Remédiez à la fatigue visuelle

Nous sommes nombreux à passer plusieurs heures par jour devant un écran et cela pèse beaucoup sur nos yeux. Voici quelques précautions d'usage :

SOIGNEZ L'ÉCLAIRAGE

La réverbération sur le bureau, les murs et les reflets sur l'écran altèrent le **contraste visuel**. Tentez d'éliminer les sources de lumière à l'origine de ces reflets.



CLIGNEZ DES YEUX & FAITES DES PAUSES

Pensez à faire des **pauses régulières** pour regarder des **objets éloignés** et **clignez des yeux**. Attention, si vous travaillez dans un environnement à l'air trop sec comme par exemple un bureau climatisé.

RÉGLEZ VOTRE ÉCRAN

Ajustez la **luminosité** de votre écran à celle de votre environnement de travail. Vous devriez différencier facilement le **texte du fond**. **Pensez à bien régler** : la taille des caractères, l'inclinaison de votre écran et de votre chaise.



GYMNASTIQUE OCULAIRE

Prenez soin de vos yeux

La gymnastique oculaire est une méthode simple et efficace pour améliorer la vision en tonifiant le système musculaire de l'œil.

LE PRINCIPE

La **fatigue oculaire** est généralement **liée au travail visuel** à distance fixe (écran, ordinateur, couture, tv...). Nous possédons tous autour de chaque œil **six muscles** qu'il est possible d'exercer. La **gymnastique oculaire** est un moyen naturel pour faire travailler ces muscles et **bénéficier d'un meilleur confort visuel**.



REMUSCLER SA VISION BINOCULAIRE

Pour soulager la fatigue oculaire, il faut rééduquer la convergence, le mécanisme au niveau du cerveau qui fait converger le regard pour obtenir une vision binoculaire. En d'autres termes, c'est la faculté de faire travailler les deux yeux, comme un seul, en parfaite coordination et harmonie.



À RETENIR

La gymnastique oculaire ne suffit pas pour bien prendre soin de vos yeux. Une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et une bonne dose de sommeil sont également requises. Pour des yeux en pleine forme, faites le plein de carotène et de vitamine A (carottes, épinards ...), évitez de fixer trop longtemps les écrans. L'excès de tabac et d'alcool peut avoir une incidence négative sur la vision et entraîner une fatigue oculaire. Enfin, n'oubliez pas de bailler et de cligner des yeux pour activer les glandes lacrymales afin d'hydrater vos yeux.

LA BASSE VISION

Causes et Solutions de la malvoyance

Avec l'augmentation de l'espérance de vie dans le monde, de plus en plus de problèmes de vision se développent parmi les seniors.

LES PRINCIPALES CAUSES DE DÉFICIENCE VISUELLE

Les causes de déficience visuelle sont multiples. Voici les plus communes d'entre elles :

- 1 Le glaucome
- 2 La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA)
- 3 La rétinopathie diabétique et la cataracte.



LES SOLUTIONS

- 1 Les loupes grossissantes améliorent le confort de lecture et diminuent l'éblouissement.
- 2 Les télé-loupe agrandissent la perception d'un tableau noir sans équipement supplémentaire.
- 3 Les télé-agrandisseur, peuvent grossir l'image jusqu'à 50 fois. Elles permettent d'écrire, de lire et même de lier l'appareil à un ordinateur grâce à son écran HD.



LES TRAITEMENTS ORTHOPTIQUES

Les traitements orthoptiques permettent d'améliorer le quotidien des personnes malvoyantes. Ils s'adressent à tous et contribuent à corriger les problèmes de vue de chacun, quel que soit l'âge, l'ancienneté de la déficience ou son type. Ils permettent de minimiser le handicap visuel, voire même de le diminuer.


OPHTALMOLOGISTE

Quand doit-on consulter ?

Pour préserver votre capital vue et dépister le plus tôt possible d'éventuelles affections, la visite chez votre ophtalmologiste est indispensable.

FAITES DES CONTRÔLES RÉGULIERS

Dès la petite enfance, les visites régulières sont très importantes. Elles permettent de **dépister rapidement** des problèmes de vue comme la **myopie**, l'**astigmatisme**, l'**hypermétropie**... En l'absence de trouble manifeste et jusqu'aux environs de la quarantaine, un **examen tous les 5 ans** est conseillé.

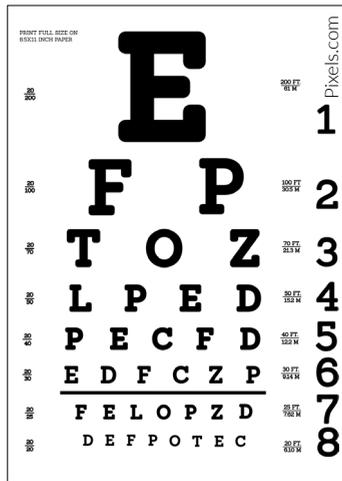

Après 40 ans, les visites de contrôle doivent être plus fréquentes, d'une **visite tous les 3 ans** jusqu'à une **visite par an** à partir de 60 ans. À partir de 50 ans, la **dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)** : Maladie de la rétine qui **affecte la vision centrale** et nécessite d'être **dépistée** et d'être **suivie** par votre **spécialiste**.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains antécédents familiaux (diabète, glaucome, cataracte...) augmentent votre risque de développer un trouble visuel. Dans ces cas, un suivi régulier chez l'ophtalmologiste s'impose.



S P E C T
EYEWEAR

WING TRIAL SYSTEM



EASTON-003



MAUBOUSSIN
Lunettes



MT11916

ZADIG & VOLTAIRE



SZV234

 **Red Bull** | **SPECT**
EYEWEAR

WING TRIAL SYSTEM



BOW-002P

WHISTLER HILLS
SINCE 1885



WHSEATOSKY02

POLICE



SPLA28

S P E C T
EYEWEAR

WING



TEL FORD-002



MAUBOUSSIN
Lunettes



MAUS182303



MAUBOUSSIN
Lunettes



MTIS 1923

NINA RICCI



VNR233

 **Red Bull** | **SPECT**
EYEWEAR



SONIC-003P

INVU. **ULTRA**
POLARIZED
BY SWISS EYEWEAR GROUP 



B2939A

LE BENJAMIN SHOW

L'association Princesse Margot

Au théâtre de Dix Heure, pour la 5ème édition du Benjamin Show, humoristes et chanteurs se sont réunis pour la bonne cause.

LE BENJAMIN SHOW A ENCORE UNE FOIS RAVI LE PUBLIC !

Suite au succès des années précédentes, le « Benjamin Show » a fait son grand retour sur les planches du Théâtre de Dix Heures, les Jedis 26 Mai et 4 Juillet 2019 à 20h. Un spectacle riche en émotion et en générosité au profit de l'association Princesse Margot, présenté par Benjamin Zeitoun.

UNE REMISE DE CHÈQUE D'UNE VALEUR DE 7 000 € À L'ASSOCIATION !

Avec la présence de Muriel Hattab, présidente de l'Association Princesse Margot et de nombreux Artistes.



Faites un don :
www.princessemargot.org



Brahms



Paul Mirabel



Tex



Soem



Ava Taieb



Richard Hervé



Benjamin Zeitoun



Alexandre Bracka



Remise du chèque à la présidente de l'association Princesse Margot

THÉÂTRE DE DIX HEURES

Le lieu culturel incontournable de Montmartre

Fondé en 1925, le Théâtre de Dix Heures fut un représentant du célèbre «esprit montmartrois». Aujourd'hui il est devenu le lieu parisien dédié à l'humour.

HISTORIQUE

Cet ancien cabaret au coeur de Pigalle est repris par Roger Ferréol qui le rebaptise *Théâtre de Dix Heures*, en référence au roman de Georges Courteline, *Les Linottes* (1912)

UN TEMPLE DU RIRE

Michel Joyeau et Michel Milette en reprennent la direction en 1990 – en partenariat avec Juste pour Rire en 2007. Depuis, des artistes de renom ajoutent leur pierre à l'édifice : Muriel Robin, Elie Semoun, Franck Dubosc, Patrick Bosso, Stéphane Guillon, le Jamel Comedy Club mais aussi Marie-Paule Belle, Hervé Vilard...



En 2015, le théâtre a été repris par Roméo Cirone, accompagné d'Eric Delcourt à la direction artistique.



theatrededixheures.fr

Adresse : 36 Boulevard Clichy 75018 Paris

Accès : Pigalle (M) 2 et (M) 12

Réservations : 01 46 06 10 17

www.theatrededixheures.fr

NOS COUPS DE CŒUR



CAROLINE LOEB

Théâtre l'Archipel,
75010 Paris



CIEL, MA BELLE-MÈRE !

Théâtre Edgar,
75014 Paris



**CORINNE
ZARZAVATDJIAN**

Le Mélo d'Amélie,
75002 Paris



**POURANG
« LABYRINTHE »**

La Comédie de Paris,
75009 Paris

Retrouvez les prochaines dates sur **Billets-Réduc**

www.billetreduc.com

RENOUVELEZ VOS LUNETTES

Une démarche simplifiée

Depuis Avril 2017, vous pouvez directement vous adresser à votre opticien pour procéder à leur renouvellement.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS POUR RENOUVELER VOS LUNETTES SANS ORDONNANCE ?

Pour vous :

- 1 Être âgé de plus de 16 ans.
- 2 Posséder une ordonnance de moins de 3 ans.

Pour l'opticien :

- 1 Procéder à un examen de vue dans un espace dédié pour préserver votre intimité et assurer le bon renouvellement de vos lunettes.
- 2 Vous informer que l'examen de vue n'est pas un acte médical.
- 3 Informer votre ophtalmologiste en cas de nouvelle correction.
- 4 Vous remettre un devis gratuit et détaillé avant la conclusion de chaque vente.



CAS PARTICULIER :

Si l'examen de vue pratiqué par votre opticien révèle une presbytie jusque-là ignorée, une nouvelle ordonnance délivrée par votre ophtalmologiste sera nécessaire. Le renouvellement de lentilles n'est pas concerné par ce dispositif.




LES VERRES CORRECTEURS

Comment bien les choisir?

Le choix de la monture est plus évident que le choix des verres, pour cause, les différents types de verres, de surfaces et de traitements.

EN EFFET, IL EXISTE 3 TYPES DE VERRES CORRECTEURS DIFFÉRENTS :

- ❶ **Les verres minéraux** : résistent aux rayures et aux agressions.
- ❷ **Les verres organiques** : en plastique, donc légers et s'adaptent à tous types de montures.
- ❸ **Les verres polycarbonates** : les plus résistants aux chocs.

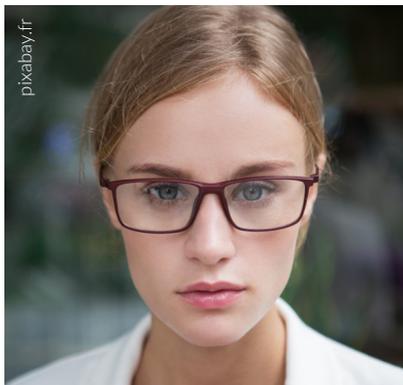

OUTRE LES TYPES DE VERRES IL EXISTE AUSSI 4 TYPES DE SURFACES :

- ❶ **Les verres unifocaux** : simple foyer qui corrige la presbytie, l'hypermétropie ou la myopie.
- ❷ **Les verres bifocaux** : double foyer permettant de voir de près mais aussi de loin avec une séparation nette des zones optiques.
- ❸ **Les verres progressifs** : comme pour les bifocaux, permettent une vision de près et de loin mais sans délimitation visible des zones optiques.
- ❹ **Les verres de proximité** : idéals pour corriger la presbytie, ils permettent de voir de près mais également dans la zone intermédiaire.

LENTILLES

Mode d'emploi

Le port de lentilles n'est pas sans risque pour la santé de vos yeux. Afin d'éviter toutes complications, des règles strictes sont à respecter.

Guide pratique pour prendre soin de ses lentilles au quotidien :

LES BONS GESTES



Lavez-vous et séchez-vous les mains avant toute manipulation. Immédiatement après le retrait, **nettoyez et désinfectez vos lentilles** avec une solution adaptée.



Placez la **lentille** dans le creux de votre main, **ajoutez quelques gouttes** de votre solution et **massez-la** délicatement.



Rincez vos lentilles abondamment avec le produit et **placez-les dans leur étui**. Remplissez chaque case de l'étui avec la solution.

Refermez les **couverts hermétiquement** et laissez **trempier vos lentilles**. Rincez régulièrement votre étui avec la solution et laissez-le sécher à l'air libre. **Pensez à changer régulièrement votre étui à lentilles**. Celui-ci ne peut être utilisé **plus de deux mois consécutifs**.



LES CONTRES INDICATIONS DU PORT DE LENTILLES

- ❶ Ne portez pas vos lentilles si elles vous semblent plissées, abîmées ou sèches.
- ❷ Ne gardez pas votre solution de conservation et de nettoyage plus de 24h.
- ❸ N'utilisez jamais de solution pour les lentilles souples pour des lentilles rigides et inversement.

LES LENTILLES ET LE MAQUILLAGE

L'art de sublimer votre regard

Maquillage et lentilles de contact ne sont pas incompatibles. Il suffit d'adopter les bons gestes pour éviter toute gêne.

Conseils et astuces pour une application sans complication :

NETTOYAGE DU VISAGE : UNE ÉTAPE CRUCIALE

Nettoyez bien votre visage et assurez-vous que vos mains soient propres et sèches avant de mettre vos lentilles et de commencer à vous maquiller.



UTILISEZ DES COSMÉTIQUES ADAPTÉS

Utilisez des produits cosmétiques exempts d'huile et de parfum, ils sont difficiles à enlever des doigts et de la peau. Optez pour un fond de teint à base d'eau, ceux à base de crème peuvent laisser un film sur vos lentilles. Privilégiez les fards à paupières liquides, crème ou gel.



APPLICATION : ADOPTEZ LES BONS GESTES

Ôtez toujours l'excès de votre poudre autour des yeux. Apposez votre fard à paupières grâce à une éponge au lieu d'un pinceau. N'appliquez jamais l'eye-liner sur le bord de l'oeil pour éviter toute irritation.



LIGHT OPTICAL

Histoire de la Marque

Depuis maintenant 13 ans Light Optical accueille ses clients dans ses 4 boutiques en Ile-de-France et propose d'entrer dans son univers mêlant l'optique et l'artistique.

LE SAVOIR-FAIRE

Nos Opticiens Visagistes et Experts de la Vue proposent de nombreuses collections de créateurs, des grandes marques internationales incontournables de l'univers de l'optique et accompagnent ses clients pour un conseil sur-mesure.

L'enseigne prend le pari de trouver à chacun sa paire de lunettes, pour un maximum de confort et de plaisir.

LE SUR-MESURE

Pour apporter une expérience inoubliable à sa clientèle, Light Optical s'est spécialisé dans les lunettes sur-mesure. Parce que chaque visage est unique, il faut lui apporter l'équipement adéquate. C'est en partenariat avec l'une des plus grande Maison du Sur-Mesure que Light Optical répond aux plus exigeants de ses clients. Ainsi, Benjamin Zeitoun présente cette gamme spécialisée sur rendez-vous.

LES SERVICES ET AVANTAGES

- Le conseil

Pour être conseillé sur le choix d'une monture qui sera la mieux adaptée à la morphologie et à aux besoins en fonction des corrections de chacun.

- La qualité

Pour bénéficier d'une garantie et d'un suivi, pour les réparations et les réglages, tout au long de la durée de vie des lunettes.

- Les meilleurs tarifs

Pour bénéficier de tarifs compétitifs, souvent moins chers que ceux pratiqués par les grandes enseignes.

- Une garantie 3 ans

Pour profiter de la qualité avec la possibilité de bénéficier d'une garantie étendue à 3 ans.

- De l'événementiel

Light Optical organise régulièrement des soirées et autres événements afin de faire de ses magasins des véritables lieux de vie.

13

Ans D'expérience

4

Boutiques

50

Marques et créateurs

98%

De clients satisfaits



LUNETTES SANS FRONTIÈRE

L'Opticien Engagé !

Light Optical en partenariat avec l'association Lunettes sans Frontière, se mobilise pour les plus démunis.

LUNETTES SANS FRONTIÈRE

Vos anciennes paires de lunettes s'entassent dans vos tiroirs et ne savez pas quoi en faire ? Elles peuvent retrouver une **seconde vie** auprès des populations n'ayant pas accès aux verres correcteurs dans **les pays en voie de développement**.

Lunettes sans Frontière est une **association** créée par le Père **François Mayer**, professeur de théologie au couvent des Capucins en **1974**.



Où vont les lunettes ?

C'est dans la commune française de **Hirsingue** depuis **1974**, qu'une trentaine de **bénévoles** trient les lunettes collectées, inscrivent les dioptries sur chaque verre et font des colis de 2 et 3 kilos qui sont acheminés en **France**, en **Afrique**, en **Asie**, en **Amérique du Sud** et en

Europe, et sont envoyés gratuitement à des personnes compétentes dans des **cliniques**, des **dispensaires** et des **missions** qui en font bénéficier **aux malvoyants et aux plus démunis** de leur pays.



EyeNeedView

Sophie Bachelier

Des chiffres Spectaculaires :

- Environ plus de **80 000** paires de lunettes mesurées et envoyées par an
- Plus de **40** colis envoyés par semaine



L'ENGAGEMENT LIGHT OPTICAL

Light Optical se mobilise en faveur des **malvoyants** en participant à la **collecte de lunettes** organisée par l'association **Lunettes Sans Frontière**. Pour participer à cette action, apportez vos

anciennes lunettes de vue, lunettes de soleil, montures, étuis dans l'un de nos **magasins**. Des **boîtes** fabriquées main pour l'occasion, ont été **mises en place** dans chaque boutique **Light Optical**. De nombreuses **paires de lunettes** qui ne sont plus adaptées à la **vue** de leurs propriétaires peuvent encore **rendre de grands services** à des personnes qui ne peuvent s'en procurer, **notre objectif** est de leur donner une **seconde vie**. Pour remercier les clients de leur participation, **Light Optical** leur offre une **remise exceptionnelle** d'un montant pouvant aller **jusqu'à 150€**.



LIGHT OPTICAL

De l'Optique à l'Artistique !

www.lightoptical.fr

LIGHT OPTICAL PARTENAIRE DE L'ASSOCIATION LUNETTES SANS FRONTIÈRE



LIGHT OPTICAL REPREND VOS ANCIENNES PAIRES DE LUNETTES POUR LA BONNE CAUSE !

www.lunettes-sans-frontiere.fr

CONSEIL MORPHO

Des lunettes pour chaque visage



SI VOTRE VISAGE EST

ROND... Des montures fines et rondes accuseront la forme du visage et souligneront votre côté «juvénile». Des montures aux angles arrondis, carrés, ovales ou encore papillonnantes atténueront la rondeur du visage. De fines montures colorées et vives mettront en valeur vos yeux.



SI VOTRE VISAGE EST

OVALE... La forme «ovale» représente 80% des visages. Toutes les formes de lunettes sont permises, évitez toutefois des lunettes trop larges. En cas de visage très allongé, il peut être conseillé, une lunette très visible (couleur sombre par exemple) qui coupe le visage en deux.



SI VOTRE VISAGE EST

TRIANGULAIRE... Si vous souhaitez atténuer la finesse de votre menton, choisissez des lunettes fines qui ne chargent pas la partie supérieure du visage. Les montures à verres percés sont idéales. Évitez les montures trop larges qui déborderaient des tempes.



SI VOTRE VISAGE EST

RECTANGULAIRE... Des montures ovales assez larges sont conseillées. Adoucissez le visage par le choix de montures aux bords plutôt arrondis et fins de préférence. Le choix d'une monture à forme géométrique et anguleuse peut accentuer le côté «autoritaire» du visage.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAUTE : VISIONER VR 2.0

LES VERRES EN RÉALITÉ VIRTUELLE ! UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE ET INTERACTIVE AVEC NOTRE NOUVEAU
SYSTÈME OCULUS.

DYNAMISEZ VOTRE
MAGASIN ET OFFREZ
UNE EXPERIENCE
UNIQUE A VOS
CLIENTS !
A DECOUVRIR DES
MAINTENANT.



POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE MERCI DE
CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENT AU 01.30.14.44.50 OU
ENVOYEZ UN EMAIL À L'ADRESSE : SCFRANCE@OPTOVISION.COM.

optoVision®
GERMANY



LIGHT OPTICAL

De l'Optique à l'Artistique !

NOS MAGASINS

LIGHT OPTICAL LEVALLOIS

2-4, place Henri Barbusse
92300 Levallois-Perret

01 47 57 98 77

LIGHT OPTICAL 9e

26, rue Cadet
75009 Paris

01 42 46 11 63



Flashez-moi
 Instagram

LIGHT OPTICAL SAINT-CLOUD

6, avenue de Longchamp
92210 Saint Cloud

01 55 57 02 06

LIGHT OPTICAL 12e

156, rue du Faubourg
Saint-Antoine 75012 Paris

01 43 07 42 69



www.lightoptical.fr